



SCHEDA DATI CANE E VETERINARIO

Da compilare e inviare unitamente al campione prelevato

Data / /

1) TIPO DI ANALISI RICHIESTA:

Deposito campione biologico Parentela * Profilo genomico *

* In queste analisi è incluso anche il DEPOSITO del Campione

2) INFORMAZIONI SUL CANE:

NOME del cane _____
RAZZA del cane _____ Sesso M F
Data di Nascita / / N° del Certificato Libro genealogico _____
Codice d'Identificazione del cane (microchip/tatuaggio) _____

3) PROPRIETARIO:

Cognome e Nome del proprietario così come registrato sul certificato genealogico:

COGNOME _____ NOME _____
Città _____ Prov. _____
Telefono _____ Cellulare _____
Email _____

4) PRELEVATORE (indicare i dati del Medico Veterinario):

COGNOME e NOME _____
Telefono _____ Email _____
Data del Prelievo _____ Tipo di materiale biologico prelevato _____
Codifica della Provetta o campione _____

Si dichiara quanto segue:

- » le informazioni riportate nel presente modulo di prelievo sono corrette
- » i campioni biologici prelevati sono stato identificati in modo chiaro e inequivocabile

Il Laboratorio declina ogni eventuale responsabilità derivante da errori di compilazione/identificazione del campione e da una non corretta esecuzione del prelievo.

Informativa sui trattamenti dei dati

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti la gestione delle prestazioni richieste.

IL PROPRIETARIO DEL CANE

(firma)

L'INCARICATO AL PRELIEVO

Timbro e firma del Medico Veterinario

Sezione riservata al Laboratorio di Biotecnologie Genetiche

Data deposito del campione biologico / /

Firma e Timbro per accettazione del campione _____


ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO del campione

Scegliere una delle seguenti modalità di prelievo:

PRELIEVO DI SANGUE: 1 ml di sangue in provette contenenti EDTA. La provetta deve essere delicatamente agitata per la completa miscelazione con l'anticoagulante. Il prelievo deve essere conservato a temperatura compresa tra + 4 C°/ + 7 C° fino al momento della spedizione al Laboratorio o alla consegna personale.



PRELIEVO DI SALIVA (tampone buccale): grattare all'interno della guancia con un tampone sterile tipo cotton fioc e riporlo in una provetta di plastica sterile. Prima di raccogliere le cellule boccali attendere almeno 1 ora dopo che il cane abbia mangiato o bevuto.

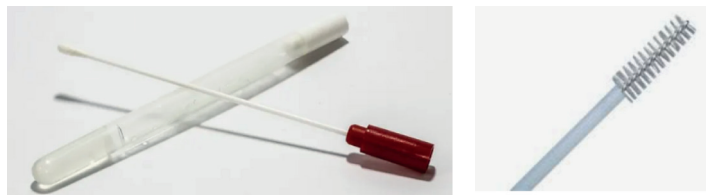

PRELIEVO CON VETKARD: tale sistema consiste in un cartoncino che racchiude un supporto di carta assorbente impregnata di una sostanza chimica che trattiene e stabilizza il Dna. Il prelievo si esegue spalmando una goccia di sangue ottenuta da un piccolo foro effettuato con l'ausilio di un ago sull'animale (per esempio labbro o orecchio) sul cerchio stampato sul cartoncino. Dopo aver lasciato asciugare a temperatura ambiente, il cartoncino deve essere riposto in una bustina e spedito in Laboratorio.



Se il campione non può essere consegnato direttamente al laboratorio ne può essere spedito il giorno stesso del prelievo o comunque in tempi rapidi, se ne consiglia la **conservazione in frigorifero (+ 4 / +7°C) per non più di 2 giorni.**



ISTRUZIONI per l'invio o la consegna del campione

Indicazioni utili per il corretto invio del campione al Laboratorio

In caso di invio del campione tramite corriere / servizio postale si **consiglia di effettuare ed inviare il prelievo nei primi giorni della settimana** così che possa essere ricevuto dal Laboratorio entro il venerdì (*siamo chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi*).

Se il campione non può essere consegnato direttamente al laboratorio ne può essere spedito il giorno stesso del prelievo o comunque in tempi rapidi, se ne consiglia la **conservazione in frigorifero (+ 4 / +7°C) per non più di 2 giorni**.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ad ogni campione da inviare:

- **Scheda Dati Cane e Veterinario** compilata, timbrata e firmata dal Medico Veterinario che effettua il prelievo (*in caso di invio di più campioni diversi utilizzare una scheda per ciascun campione*);
- **Fotocopia della ricevuta di pagamento.**

Come inviare o consegnare il campione:

PER LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE TRAMITE SERVIZIO POSTALE O CORRIERE, utilizzare l'etichetta posta qui a fianco ritagliandola e incollandola sulla busta o sul pacco.

Prof.ssa Roberta Ciampolini
**Dipartimento di Scienze Veterinarie
Laboratorio Biotecnologie Genetiche
Viale delle Piagge, 2
56124 PISA**

PER CONSEGNARE IL CAMPIONE DIRETTAMENTE AL LABORATORIO rivolgersi a:

**Laboratorio di Biotecnologie Genetiche
Sportello Accettazione Campioni Biologici
Via Guglielmo Agnelli (senza numero civico)
56124 Pisa**

nei seguenti orari di apertura:

dal Lunedì al Venerdì:
dalle 8.30 alle 14.00 e
dalle 14.30 alle 20.30

Sabato dalle 8.00 alle 13.00